

BETACHEK[®] C50

Kassetten-Blutzuckermesssystem

Kurzanleitung

Modell C50-1

DE



NDP


Kurzanleitung



Vorbereitung des BETACHEK® C50-Messgeräts

- 1** Schutzfolie vom Display entfernen.

Schutzlasche aus Batteriefach ziehen.

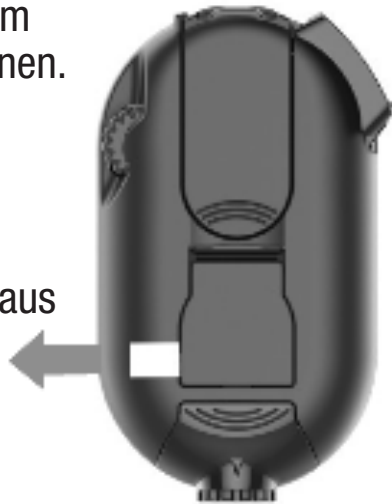

- 2** Sensorabdeckung bis zum Anschlag nach links schieben. Messgerät schaltet sich ein.



- 3** Kassette einlegen, Sensorabdeckung schließen.



- 4** Lanzettenabdeckung aufschieben.



- 5** Lanzette einsetzen, Kappe abdrehen.



- 6** Lanzettenabdeckung schließen, Eindringtiefe einstellen.





Durchführung eines Tests

1 Hände mit warmem Wasser waschen.



2 Hände gründlich abtrocknen.



3 Sensorabdeckung öffnen und auf Drehsymbol warten: 



4 Daumenrad drehen bis Testbereich in Position ist und Display "OK" anzeigt.



5 Tiefeneinsteller fest gegen Einstichstelle drücken. S* drücken.




* Für erneutes Spannen die Abdeckung schließen und öffnen.







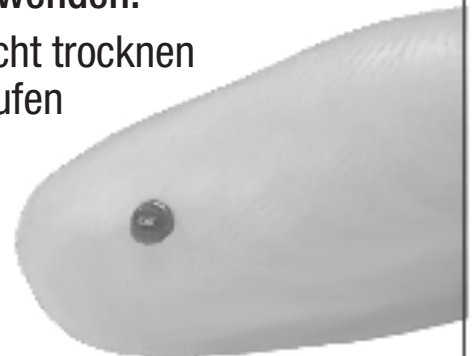


6 Kleinen Blutstropfen gewinnen.


Sofort verwenden.

Tropfen nicht trocknen oder verlaufen lassen.



 **Durchführung eines Tests**

<p>7 Blut auftragen.</p> 	<p> Auf das rot blinkende Licht zielen.</p> 
<p> Beleuchteten Bereich mit Blut bedecken. Testzone nicht berühren.</p> 	<p>8 Ergebnisse in ca. 5 Sekunden.</p> 
<p>9 Daumenrad drehen (zur Entsorgung des verwendeten Tests), bis "OK" angezeigt wird.</p>  	<p>10 Sensorabdeckung schließen. Das Messgerät schaltet sich aus.</p> 

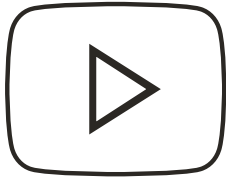

BETACHEK® C50 Videoanleitungen

Um Sie bei der Verwendung Ihres BETACHEK® C50-Messgeräts zu unterstützen, können Sie auch unsere detaillierten Videoanleitungen anzeigen, die Folgendes abdecken:

- Einstellen des Blutzuckermessgeräts
- Testvorgang -- Messen Ihres Blutzuckerspiegels
- Kontrolltest -- Testen mit Kontrolllösung
- App-Konfiguration -- Nutzung der BETACHEK® Diabetes-Management-App

Die Videoanleitungen finden Sie auf:

- www.betachek.de
- YouTube (Suche nach dem Kanal "Betachek")
- oder scannen Sie diesen QR Code von Ihrem Mobilgerät



Bitte beachten Sie: Unsere Videoanleitungen sind kein Ersatz für das Benutzerhandbuch oder die Testkassetten- / Kontrolltestanweisungen, die immer sorgfältig gelesen werden sollten.

BETACHEK®

 Videos

 YouTube



BETACHEK® Diabetes-App



Händler:

Kundenservice

support@betachek.de

+49 (0)241-91 99 88 66

Betachek GmbH · Am Dorbach 12 · 52076 Aachen www.betachek.de