

BETACHEK C50

Einlegen einer Testkassette

Vor Testbeginn muss eine Testkassette eingelegt sein. Testkassetten sind separat erhältlich.

Wichtig: Nehmen Sie die Testkassette erst aus dem Behälter kurz bevor Sie diese in das Messgerät einlegen. Der Behälter schützt die Testkassette vor Beschädigung und Feuchtigkeit. Die Kassette kann im Messgerät verbleiben und muss nur entfernt werden, wenn das Messgerät gereinigt wird. Testkassetten müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Öffnen verwendet werden.

Schritt 1 Sensorabdeckung öffnen

Schieben Sie die Sensorabdeckung **bis zum Anschlag** in Pfeilrichtung. Dadurch wird das Messgerät eingeschaltet.



Schritt 2 Testkassette einlegen

Wenn das Symbol für das Einlegen der Kassette angezeigt wird, nehmen Sie die Kassette aus dem Behälter und drücken Sie sie in die angezeigte Position.

Die Testkassette sollte sicher einrasten und **flach** im Messgerät liegen.



Wichtig:

Überprüfen Sie, ob die Kassette eingerastet ist.

Sie sollte nach dem Einlegen fest sitzen.

Entfernen einer Testkassette

Nachdem alle 50 Tests durchgeführt wurden, entfernen Sie die gebrauchte Testkassette und entsorgen Sie sie im normalen Hausmüll.

Schritt 1 Sensorabdeckung öffnen

Schritt 2 Kassette lösen

Schieben Sie die Kassette wie angezeigt leicht nach vorne. Drücken Sie dabei gleichzeitig mit dem Daumen leicht auf das untere Ende mit der Rillenformierung.

Schritt 3 Kassette entfernen

Greifen Sie die Kassette am oberen Ende und ziehen sie diese vom Gerät weg nach oben hin heraus.

