

Brauchen Sie Hilfe?  
E-Mail: support@betachek.de

**BETACHEK® C50**

Alles in einem Blutzuckermessgerät

*Schnellstartanleitung*




*Videoanleitungen*

Richten Sie die Kamera Ihres  
Mobiltelefons auf diesen QR-  
Code für Videoanleitungen



Betachek Diabetes-Management-App.

Laden im  
 App Store

JETZT BEI  
 Google Play

- Das BETACHEK C50 Messgerät und die integrierte Stechhilfe sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Nicht für den Einsatz bei mehreren Patienten/-innen.
- Das BETACHEK C50 wird mit einer 5-Jahres-Garantie gegen Defekte und Fehler geliefert. Sie deckt keine versehentlichen Schäden oder Missbrauch ab. Um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an: [support@betachek.de](mailto:support@betachek.de)
- Diese Schnellstartanleitung ersetzt nicht das Benutzerhandbuch, das wichtige Zusatzinformationen enthält.



# Zusammenfassung der Teile



- 1. Sensorabdeckung
- 2. Bildschirm
- 3. Schaltfläche „Einstellungen“
- 4. Speicherabruf-taste



- 5. Einstellrad für Eindringtiefe
- 6. Lanzettenhalter
- 7. Lanzette
- 8. Lanzettenauswerfer



- 9. Testkassette
- 10. Daumenrad
- 11. Batterieabdeckung
- 12. Lanzettenabdeckung
- 13. Eindringtiefeanzeige
- 14. Sensor

# Bereiten Sie das Messgerät vor

1

Ziehen Sie die Schutzfolie vom Bildschirm ab.

Ziehen Sie die Schutzlasche aus dem Batteriefach.



2

Schieben Sie die Sensorabdeckung bis zum Anschlag nach links. Das Messgerät schaltet sich ein.



- 3** Legen Sie die Kassette mit dem abgerundeten Ende zuerst ein und drücken Sie sie flach. Sensorabdeckung schließen.




- 4** Schieben Sie die Lanzettenabdeckung auf.



- 5** Setzen Sie die Lanzette ein und drehen Sie die Schutzkappe ab.



- 6** Schließen Sie die Lanzettenabdeckung und stellen Sie die gewünschte Eindringtiefe ein.

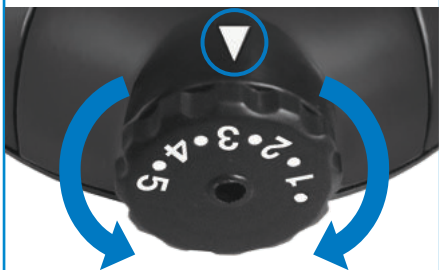

# Uhrzeit und Datum einstellen


- 1 Halten Sie die S-Taste gedrückt, um das Einstellungs Menü aufzurufen.



Das Messgerät kann „exp“ anzeigen (Kassette abgelaufen) wenn das korrekte Datum nicht eingestellt ist.



- 2 Drücken Sie M, um das blinkende Zeichen zu ändern. Drücken Sie S zum Speichern.

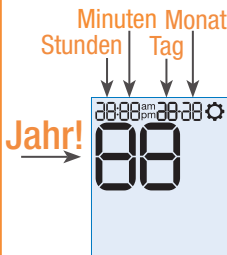




# Verbinden mit der App (optional)

- 1 Laden Sie die App auf Ihr Mobilgerät herunter



BETACHEK Diabetes App

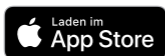




- 2 Halten Sie die Tasten S + M gedrückt, bis das Symbol für die drahtlose Kopplung erscheint\*.

Öffnen Sie die App auf Ihrem mobilen Gerät und folgen Sie den Anweisungen.



\* Einige Modelle können ein leicht abweichendes Symbol anzeigen.

# Schlüssel zu Fehlermeldungen

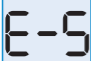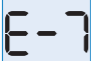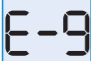	<p><b>Benutzer Test wurde nicht in die Abfallkammer bewegt.</b> Öffnen Sie die Sensorabdeckung und wickeln Sie den benutzten Test ab.</p>
	<p><b>Blut zu früh aufgetragen oder Sensorfenster verschmutzt.</b> Warten Sie auf das Blutstropfen-symbol oder reinigen Sie das Messgerät.</p>
	<p><b>Zu viel Umgebungslicht oder Sensorfenster verschmutzt.</b> Schalten Sie das Messgerät ab.</p>
	<p><b>Kassette zu weit vorgespult.</b> Drehen Sie das Daumenrad weiter, bis das Messgerät „OK“ anzeigt.</p>
	<p><b>Zu wenig Blut.</b> Verwenden Sie einen größeren Tropfen oder drücken Sie den Tropfen nach unten, um ihn zu verteilen.</p>
	<p><b>Testzone beschädigt oder Sensorfenster verschmutzt.</b> Entfernen Sie die Kassette und reinigen Sie das Sensorfenster.</p>
	<p><b>Testkassette abgelaufen.</b> Kassette länger als 90 Tage in Benutzung oder Verfallsdatum erreicht. Kassette ersetzen.</p>

# Führen Sie einen Test durch

**1**

Waschen Sie Ihre Hände mit warmem Wasser.



**2**

Trocknen Sie Ihre Hände gründlich ab.



3

Öffnen Sie die Sensorabdeckung und warten Sie auf das Daumenrad-Symbol:



4

Drehen Sie das Daumenrad, bis eine Testzone vorhanden ist und auf dem Bildschirm "OK" angezeigt wird.




- 5** Drücken Sie den Tiefenwähler fest gegen die ausgewählte Einstichstelle und drücken Sie dann S\*.



Ja,  
Sie können  
es noch  
einmal  
versuchen

\* Schließen und öffnen Sie die Sensorabdeckung, um die Stechhilfe erneut zu spannen

- 6** Drücken Sie vorsichtig einen kleinen runden Blutstropfen aus. Halten Sie die Handfläche nach unten gerichtet.

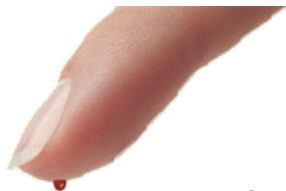

**Sofort verwenden.** Lassen Sie den Tropfen nicht verlaufen, eintrocknen oder sich ausbreiten.

7

Warten Sie auf das blinkende Blutstropfen-Symbol und tragen Sie dann Blut auf.



Zielen Sie auf das rote Blinklicht.





Sie können den Blutstropfen nach unten drücken, um ihn zu verteilen.



Berühren Sie die Testzone nicht.



Bedecken Sie den rot beleuchteten Bereich mit Blut, sonst zeigt das Messgerät **E-7** an oder liefert ein ungenaues Ergebnis.



Achten Sie darauf, dass kein Blut aus der Testzone auf das Messgerät gelangt.



Siehe den Abschnitt über die Reinigung.



Wischen Sie nicht mit einem kleinen Tropfen über die Testzone. Es sollte ein größerer Tropfen verwendet werden.



8

Ergebnis in ca. 5 Sekunden.






- 9** Drehen Sie das Daumenrad bis "OK" angezeigt wird um den Test in den Abfall zu transportieren.



- 10** Schließen Sie die Sensorabdeckung. Das Messgerät schaltet sich aus.  
HINWEIS: Wenn Sie Schritt 9 überspringen, wird **E-3** angezeigt. Öffnen Sie einfach die Abdeckung und führen Sie Schritt 9 aus.

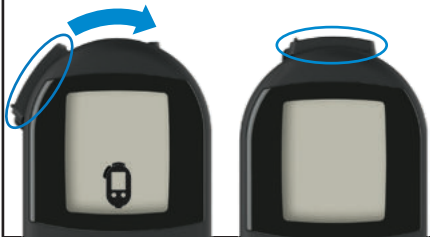

# Reinigen Sie das Messgerät

1

Drücken Sie auf den gebogenen Griffbereich und heben Sie das andere Ende der Kassette heraus.



E-4  
E-5  
E-9  
E-12

Entnehmen einer Testkassette

2

Reinigen Sie das Sensorfenster mit einem feuchten Wattestäbchen oder einem weichen Linsenreiniger in der angegebenen Richtung.

